

# *Printer Driver*

---

## Inställningshandbok

I denna handledning beskrivs hur skrivardrivrutinen för Windows Vista, Windows XP och Windows 2000 ska installeras.

### **Innan du använder programvaran**

Läs "ReadMe"-filen innan du använder skrivardrivrutinen.

## UP-DR80MD

De skärmar som används för att beskriva installationen i denna handledning förutsätter att UP-DR80MD skrivaren är ansluten till en dator som kör Windows Vista.

---

## Konfigurera skrivaren

Innan du börjar skriva ut från programmen ska du öppna skrivarens inställningsskärm och konfigurera inställningarna.

Det går att öppna skrivarens inställningsskärm med en av följande metoder.

- På [Start]-menyn väljer du [Control Panel] och sedan [Printer] ([Start]-meny, sedan [Printers and Faxes] för Windows XP; [Start]-meny, [Settings], sedan [Printers] för Windows 2000). Välj skrivarikonen för Sony UP-DR80MD och välj sedan [Select printing preferences] från kommandolistan ([Printing Preferences] från [File]-menyn för Windows XP och Windows 2000). De inställningar du gör här används som standardinställningar vid utskrift från program.
- Klicka på det kommando som används för att göra skrivarinställningar i menyn [File] i din programvara. De inställningar du gör på det här sättet gäller bara tills du stänger programvaran.

Handledningen beskriver de flikar som visas på UP-DR80MD inställningsskärmen.

### **Fliken [Paper]**

Grundläggande tryckrelaterade inställningar.

### **Fliken [Graphics]**


Används till att ställa in gråbalans, ljusstyrka och andra inställningar relaterade till bildkvalitet.

### **Fliken [Message]**

Används till att konfigurera inställningar relaterade till dialogrutor för meddelanden.

## [Paper] Inställningar på flik

Konfigurera grundläggande tryckrelaterade inställningar.

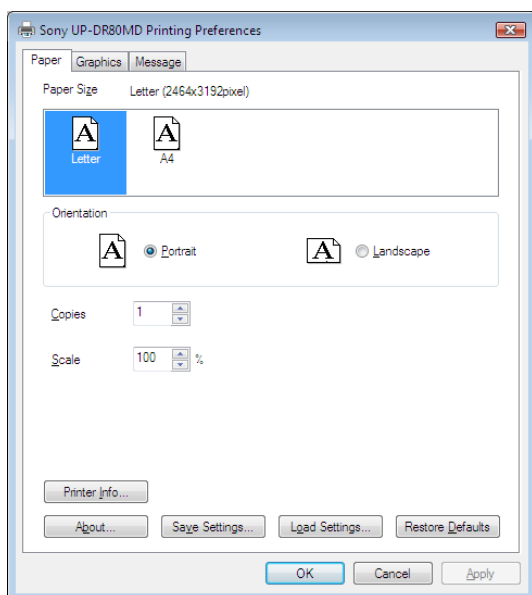

### Paper Size

Den pappersstorlek som kan användas tillsammans med denna skrivare och den maximala utskriftsstorleken är som följer.

| Paper Size | Maximal utskriftsstorlek |
|------------|--------------------------|
| Letter     | 2 464 × 3 192 pixlar     |
| A4         | 2 392 × 3 400 pixlar     |

### Orientation

Välj antingen [Portrait] eller [Landscape] som utskriftsriktning.

### Copies

Det går att ställa in detta på mellan 1 och 10.

### Scale

Anger utskrifternas skala. Det går att ställa skalan på mellan 25 and 400%.

### Printer Info

Visar information relaterad till den skrivare som för tillfället är ansluten.

### Save Settings

Sparar alla konfigureringar av utskriftsinställning i en fil.

## Load Settings

Laddar konfigureringar av sparade inställningar från en fil.

## About

Visar versionsuppgifter om denna skrivardrivenhet.

## Restore Defaults

Återställer alla inställningar på fliken [Paper] till respektive standardvärden.


## [Graphics] Inställningar på flik

Om du vill ändra dessa inställningar ska du välja [Color Balance] eller [Lightness], [Color Correction] eller [Gray Balance] i listan [Color Adjust].

### Color Balance

Justerar färgbalansen. Justera inställningen genom att flytta reglaget åt vänster eller höger. Det går också att göra justeringar genom att skriva in värden i rutan till höger.


Effekterna av justeringarna återspeglas i förgranskningsbilden högst upp till höger.

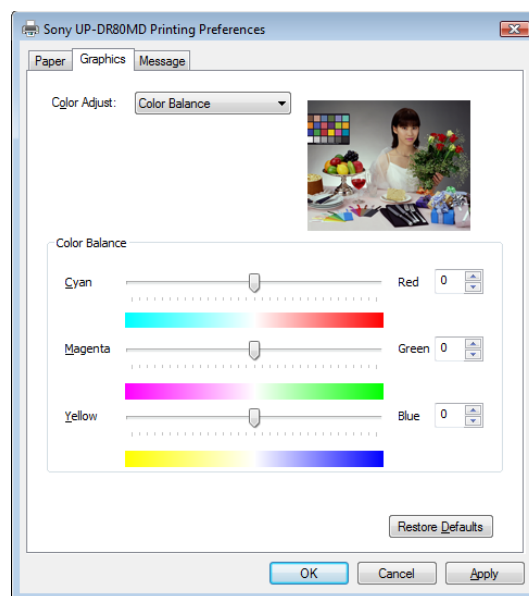

### Lightness

Justerar ljusstyrkan. Justera inställningen genom att flytta reglaget åt vänster eller höger. Det går också att göra justeringar genom att skriva in värden i rutan till höger.

Effekterna av justeringarna återspeglas i förgranskningsbilden högst upp till höger. Men effekterna av skärpejusteringar återspeglas inte.

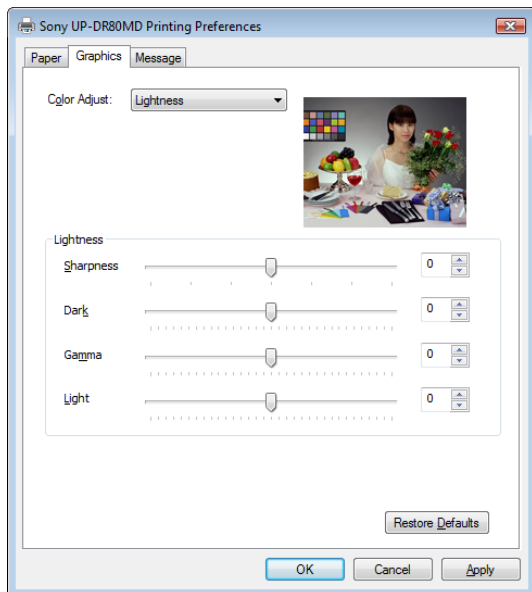

### Sharpness

Justerar skärpan i bildkonturer. Bildkonturerna blir skarpare när inställningen ökas till högre värde.

### Dark

Justerar skalan för de mörka tonerna.

### Gamma

Justerar skalan för de medelmörka tonerna.


### Light

Justerar skalan för de ljusa tonerna.

## Color Correction

Välj metod för färgkorrigering.

Effekterna av dessa inställningar återspeglas inte i förgransningsbilden högst upp till höger.

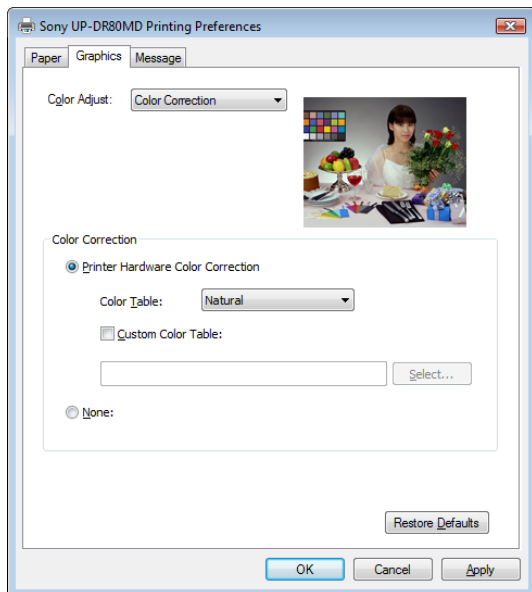

## Printer Hardware Color Correction

Skrivaren korrigerar färg.

### None

Ingen färgkorrigering utförs av skrivarens hårdvara.

### Color Table

Väljer intern färgtabell för skrivaren.

Natural: Utför korrigering som är lämplig för sRGB-kompatibla bilder.

CG: Utför korrigering som är lämplig för CG-bilder.

### Custom Color Table


Välj detta vid användning av annan färgtabell än skrivarens interna.

## Gray Balance

Använd denna flik för att justera bildutskriftens färgton så att den motsvarar färgtonen på bildskärmen.

När du sätter dit nytt färgband och laddar papper kan du även justera gråbalansen och därmed korrigera eventuella skillnader mellan de två.

Effekterna av justeringarna återspeglas i förgransningsbilden högst upp till höger.

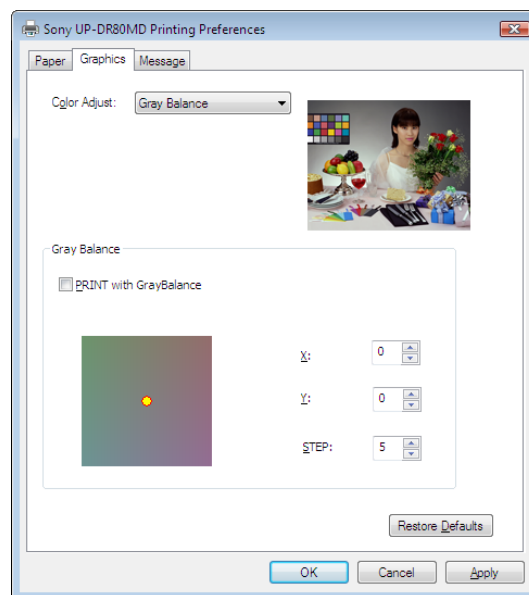

### PRINT with GrayBalance

När du väljer denna kryssruta skapas en gråbalansutskrift för utskriftsdata.

### X, Y

Justerar gråbalansen genom att ställa in X- och Y-koordinaterna för gråbalansdiagrammet längst ner.

Standard för båda inställningarna är 0, och gråbalansen justeras inte under denna inställning.


Effekterna av justeringarna återspeglas i förgransningsbilden högst upp till höger.

## STEP

Specificera den inkrementella ökningen av gråbalansen för utskrifter med gråbalans. Standardinställningen är 5. Ställ in ett lägre värde när du gör exakta justeringar av gråbalans och ställ in ett högre värde när du gör bredare justeringar.

För att skriva ut gråbalanseringen som en referens för justering ska du välja kryssrutan [PRINT with GrayBalance] och skriva ut. När du gör detta visas följande dialogruta. Ange det område som ska användas för att bekräfta färgtonen genom att dra ramen (markeringsrutan) i förgranskningsfönstret. Det går att justera ramens storlek genom att justera inställningen [Frame Size]. Det går också att ändra ramens färg genom att justera inställningen [Frame Brightness].

Ram (markeringsruta)

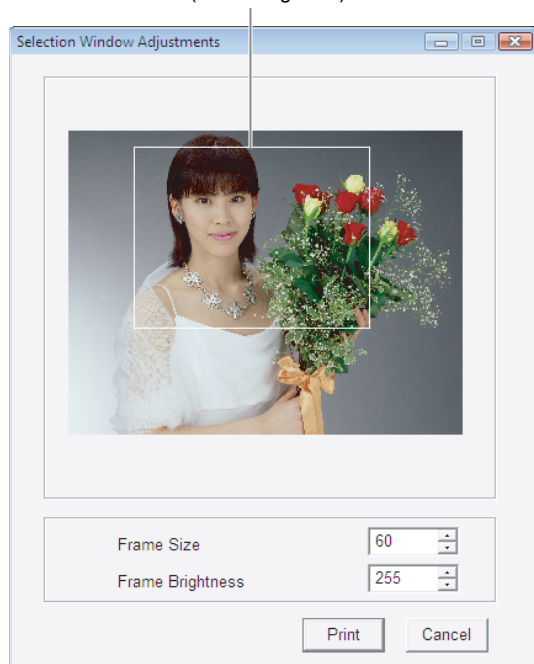

Om du klickar på [Print]-knappen görs en utskrift av området (5 × 5) inom markeringsrutan. Välj bilden med bäst gråbalans bland 25 bilder som skrivs ut och skriv in X- och Y-koordinater (X,Y) som anges under denna bild för [X]- och [Y]-inställningar.

## Restore Defaults


Återställer alla ändrade inställningar på fliken [Graphics] till respektive standardvärden.

### OBS

Det kan förekomma skillnader i bild- och färgkvalitet mellan förgranskningsbilden och den bild som faktiskt skrivs ut. Detta beror på skillnader som kan finnas när det gäller metoder för färgproduktion och display-miljöer. Förgranskningsbilderna ska endast vara till ledning.

## [Message] Inställningar på flik

Välj visningsposition för dialogrutorna med meddelanden.

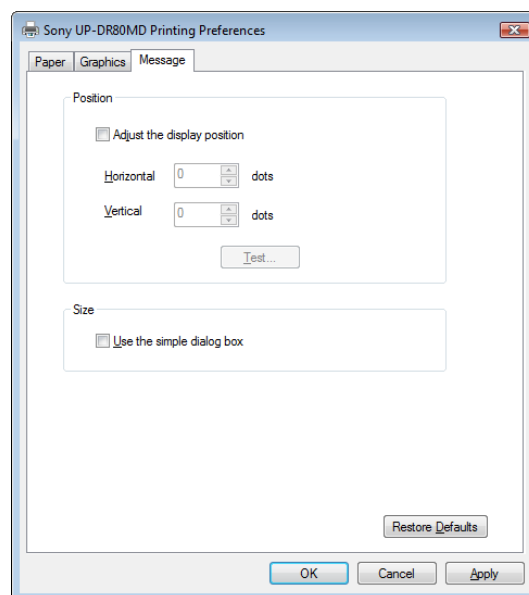

## Adjust the display position

Markera den här kryssrutan om du vill ändra visningsposition för dialogrutorna med meddelanden. Meddelanderutan visas i den position som definieras av de värden som specificeras i rutorna [Horizontal] och [Vertical].

Standardinställning: Kryssrutan [Adjust the display position] är inte markerad. (Meddelandedialogrutorna visas mitt på displayen.)

## Horizontal och Vertical

Definierar meddelandedialogrutornas positioner med utgångspunkt i skärmens övre vänstra hörn. Dialogrutan för meddelanden visas i det läge som definieras med här angivna värden.

## Test

Klicka på den här knappen om du vill visa en dialogruta med ett testmeddelande i den position som definierats med [Horizontal] och [Vertical]. Då kan du kontrollera att positionen är korrekt.

## Use the simple dialog box

Markera den här kryssrutan om du vill använda mindre dialogrutor.

## Restore Defaults

Återställer alla ändrade inställningar på fliken [Message] till respektive standardvärden.