

Printer Driver

Oppsettsveiledning

Denne veiledningen beskriver installasjon og bruk av skriverdriverne for Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Windows 2000.

Før denne programvaren brukes

Før du bruker skriverdriveren må du lese "Readme"-filen.

UP-DR80MD

Skjermbildene som brukes for å beskrive oppsettet i denne veiledningen forutsetter at skriveren UP-DR80MD er koplet til en datamaskin med Windows Vista.

Konfigurere skriveren

Før du begynner å skrive ut fra programmer må skriverinnstillingene åpnes og konfigureres.

Du kan åpne skriverinnstillingen på en av følgende måter:

- På [Start]-menyen, velg [Control Panel] og deretter [Printer] ([Start]-meny, Klikk så på [Devices and Printers] for Windows 7; [Start]-meny, Klikk så på [Printers and Faxes] for Windows XP; [Start]-meny, [Settings], så [Printers] for Windows 2000). Velg skriverikonet for Sony UP-DR80MD, og velg så [Select printing preferences] fra kommandolinjen (Velg [Printing preferences] ved å høyreklikke skriverikonet for Windows 7; [Printing Preferences] fra [File]-menyen for Windows XP og Windows 2000). Innstillingene du angir her blir brukt som standardinnstillinger når du skriver ut fra applikasjoner.
- På [File]-menyen i applikasjonen klikker du på kommandoen som brukes for å angi skriverinnstillinger. Innstillingene som angis på denne måten gjelder til du lukker applikasjonen.

Denne veiledningen beskriver fanene som dukker opp i innstillingsskjermen UP-DR80MD.

[Paper]-fane

Elementære innstillinger for utskrift.

[Graphics]-fane


Brukes til å angi farge, lysstyrke og andre bilderelaterte innstillinger.

[Message]-fane

Brukes til å konfigurere innstillinger relatert til meldingsbokser.

Innstillinger i [Paper]-fanen

Elementære innstillinger for utskrift.

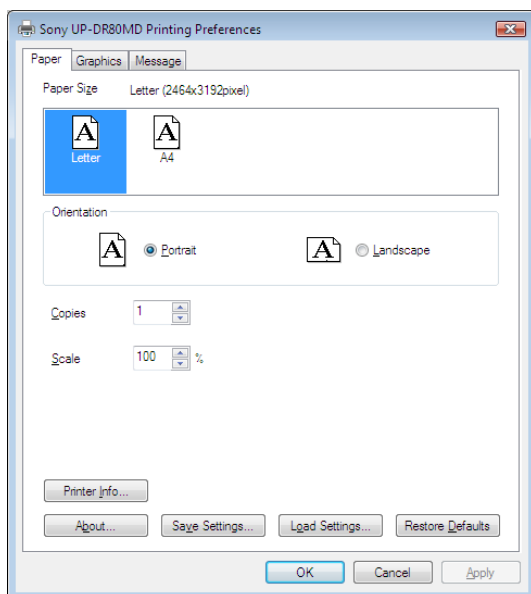

Paper Size

Standard papirformat for denne skriveren, samt det største papirformatet som kan brukes, er som følger:

Paper size	Største utskriftsformat:
Letter	2464 × 3192 piksler
A4	2392 × 3400 piksler

Orientation

Velg enten [Portrait] eller [Landscape] som papirretning.

Copies

Du kan angi mellom 1 og 10 eksemplarer.

Scale

Angi utskriftsskalering. Du kan sette skaleringen til mellom 25 og 400%.

Printer Info

Viser informasjon om den tilkoblede skriveren.

Save Settings

Lagrer alle konfigurerte skriverinnstillinger til en fil.

Load Settings

Laster inn lagrede innstillingskonfigurasjoner fra en fil.

About

Viser versjonsinformasjon om denne skriverdriveren.

Restore Defaults


Gjenoppretter alle innstillinger i [Paper]-fanen til standardvalgene.

Innstillinger i [Graphics]-fanen

Velg [Color Balance], [Lightness], [Color Correction] eller [Gray Balance] i [Color Adjust]-listen for å endre disse innstillingene.


Color Balance

Justerer fargebalansen. Juster innstillingen ved å flytte velgeren til venstre eller høyre. Du kan også foreta justeringer ved å skrive inn verdier i boksen til høyre. Effekten av justeringene vil vises i prøvebildet øverst til høyre.

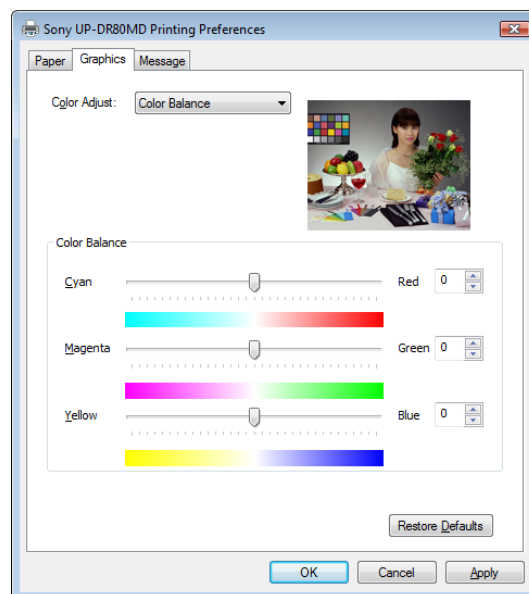

Lightness

Justerer lysstyrken. Juster innstillingen ved å flytte velgeren til venstre eller høyre. Du kan også foreta justeringer ved å skrive inn verdier i boksen til høyre. Effekten av justeringene vil vises i prøvebildet øverst til høyre. Effekten av skarphetsjusteringene vil imidlertid ikke vises.

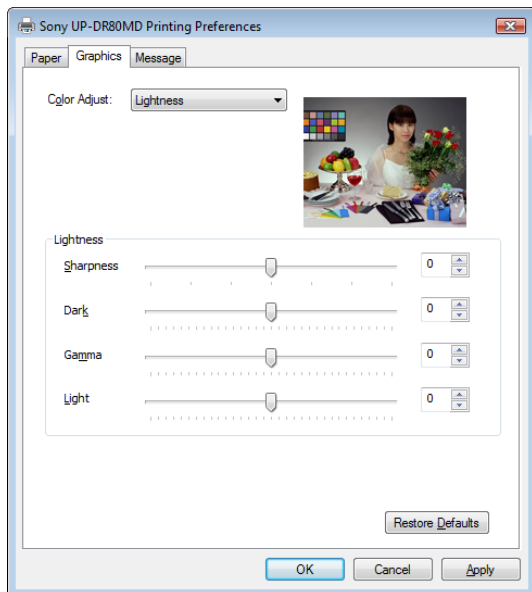

Sharpness

Justerer skarpheten i bildeomrisset. Bildeomrissene blir skarper etter hvert som innstillingen økes.

Dark

Dark Justerer skaleringen av de mørke tonene.

Gamma

Gamma Justerer skaleringen av de middels lyse tonene.


Light

Justerer skaleringen av de lyse tonene.

Color Correction

Velg fargekorrigeringsmetoden.

Effekten av disse innstillingene vil ikke vises i prøvebildet øverst til høyre.

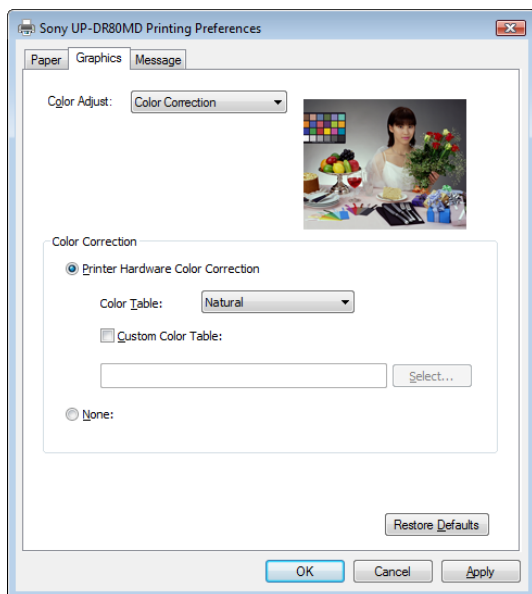

Printer Hardware Color Correction

Skriveren korrigerer farge.

None

Ingen fargekorrigering blir utført av skriveren.

Color Table

Velg skriverens interne fargetabell.

Natural: Utfører korrigering som passer for alle sRGB-kompatible bilder.

CG: Utfører korrigering som passer for CG-bilder.

Custom Color Table


Velg dette når du bruker en annen fargetabell enn den som finnes internt i skriveren.

Gray Balance

Bruk denne fanen for å justere nyansen på et utskriftsbilde slik at det samsvarer med nyansen på skjermen.

Når du installerer et nytt fargebånd og legger i papir, kan du justere gråbalansen for å korrigere eventuelle ujevnheter mellom de to.

Effekten av justeringene vil vises i prøvebildet øverst til høyre.

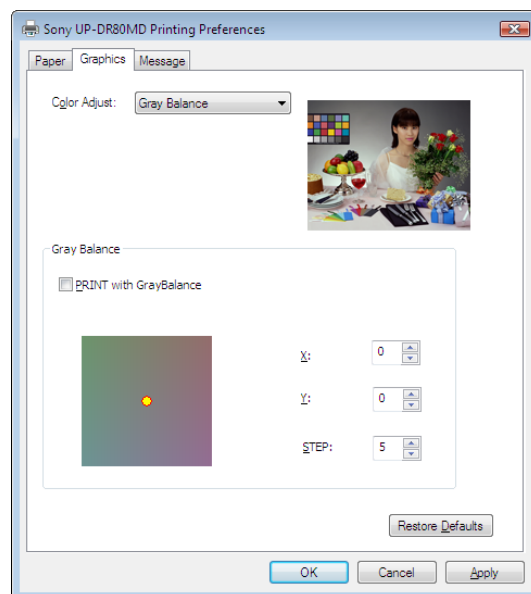

PRINT with GrayBalance

Når du velger denne avmerkingsboksen opprettes en gråbalanseutskrift for utskriftsdataen.

X, Y

Juster gråbalansen ved å stille inn X og Y-koordinatene for gråbalansekartet nede til venstre. Standard for begge innstillinger er 0, og gråbalansen justeres ikke under denne innstillingen.


Effekten av justeringene vil vises i prøvebildet øverst til høyre.

STEP

Spesifiser den økende endringen i gråbalanse for gråbalanseutskriften. Standardinnstilling er 5. Still inn en lavere verdi når du gjør nøyaktige gråbalansejusteringer, og still inn en høyere verdi når du gjør bredere justeringer.

For å skrive ut gråbalansen som referanse for justeringen, velg [PRINT with GrayBalance] avmerkingsboksen og skriv ut. Når dette gjøres vil følgende dialogboks vises: Angi området som skal brukes for å bekrefte nyansen, ved å dra rammen (valgvindu) i prøvebildet. Du kan justere størrelsen på rammen ved å justere innstillingen [Frame Size]. Du kan også endre fargen på rammen ved å justere innstillingen [Frame Brightness].

Ramme (valgvindu)

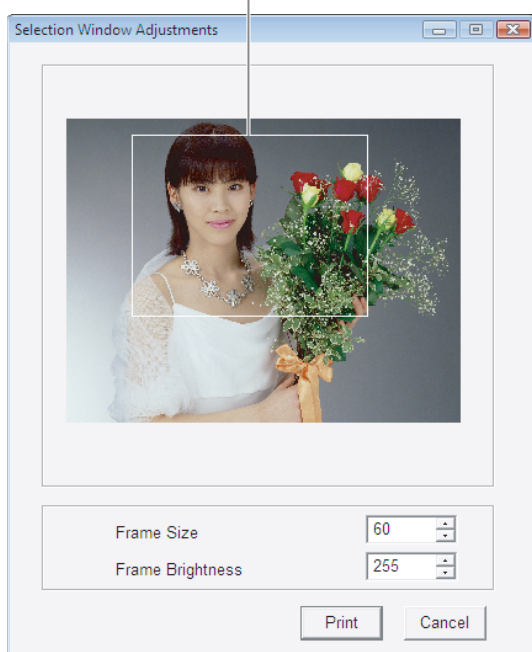

Når du trykker på [Print]-knappen vil den delen av bildet som er spesifisert av utvalgsvinduet skrives ut med en 5 x 5 celle-layout. Velg bildet med den beste gråbalansen fra de 25 bildene som er skrevet ut, og tast inn X og Y-koordinatene (X,Y) skrevet ut under det bildet for [X] og [Y]-innstillingene.

Restore Defaults


Gjenoppretter alle endrede innstillinger i [Graphics]-fanen til standardvalgene.

Merk

Det kan være forskjeller i bildekvalitet og farge fra prøvebildet og det bildet som faktisk blir skrevet ut. Dette er grunnet forskjeller i bildeproduksjonsmetoder og skjemvisning. Prøvebildet må kun brukes som veiledning.

Innstillinger i [Message]-fanen

Velg visningsposisjon for meldingsdialogbokser.

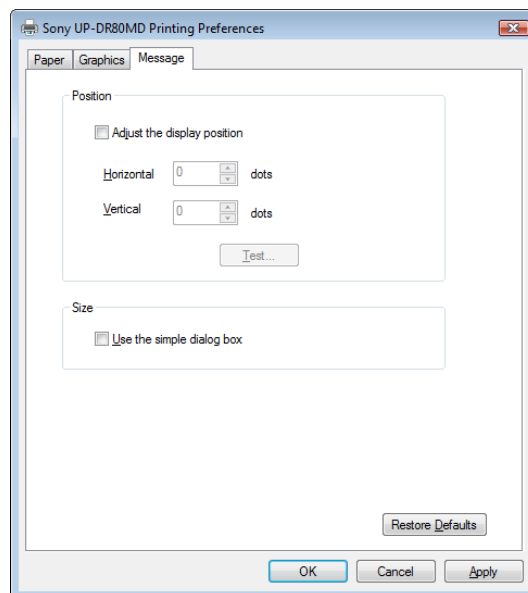

Adjust the display position

Merk av i denne avkryssingsruten for å justere visningsposisjonen for meldingsdialogboksene.

Meldingsdialogboksen vises i posisjonen definert av verdiene som er angitt i [Horizontal]- og [Vertical]-boksene.

Standardinnstilling: Det er ikke krysset av i [Adjust the display position]. (Meldingsdialogboksene vises midt på visningen.)

Horizontal og Vertical

Definerer posisjonen til meldingsboksene ved å bruke hjørnet oppe til venstre på skjermen som utgangspunkt. Meldingsdialogboksen vises i posisjonen definert av verdiene som er angitt her.

Test

Klikk på denne knappen for å vise testmeldingsboksen i posisjonen som er definert av [Horizontal] og [Vertical], for på den måten å bekrefte nøyaktigheten til posisjonen.

Use the simple dialog box

Merk av i denne avkryssingsruten for å vise meldingsdialogboksene i mindre størrelse.

Restore Defaults

Gjenoppretter alle endrede innstillinger i [Message]-fanen til standardvalgene.