

Printer Driver

Орнату нұсқаулығы

Бұл нұсқаулықта Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP жүйесіне арналған принтердің драйверін орнату әдісі сипатталған.

Осы бағдарламалық құралды пайдалану алдында

Принтер драйверін пайдаланудан бұрын «Readme» файлын оқыңыз.

UP-991AD
UP-971AD

Мазмұны

Принтерді конфигурациялау	3
[Main] қойындысының параметрлері	4
[Density Adjust] қойындысының параметрлері	6
[Settings] қойындысының параметрлері	7
[Message] қойындысының параметрлері	8
Хабарлар тізімі	9
Пайдалануға арналған сақтық шаралар	10

Microsoft және Windows - Microsoft
Корпорациясының тіркелген сауда белгілері.
Бұл нұсқаулықта аталған басқа компания аттары мен
өнім аттары да сауда белгілері және тіркелген сауда
белгілері.

Осы нұсқаулықта орнатуды сипаттайтау үшін пайдаланылған көріністер UP-991AD/UP-971AD принтері Windows 7 ортасында пайдаланылатынын түсіндіреді. Параметрлер туралы толық ақпаратты алу үшін осы нұсқаулықпен үйлесімді принтердің пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Принтерді конфигурациялау

Құрылғыдан басып шығарудың алдында UP-991AD/UP-971AD параметрлері экранын ашып, әр түрлі параметрлерді конфигурациялауға болады. Windows 8, Windows 7, Windows Vista немесе Windows XP жүйесінде принтерді келесі ортада орнатыңыз.

- Дисплей ажыратымдылығы келесі мәннен үлкен: SVGA (800 × 600)
- Экран таңбасының өлшемі әдепкі.
Windows XP: қалыпты өлшем (96 DPI)
Windows Vista: әдепкі масштабтау (96 DPI) - қосымша ақпарат қою
Windows 8, Windows 7: кішірек - 100% (әдепкі)

Келесі әдістердің біреуімен параметрлер экранын ашуға болады.

- [Start] мәзірінде [Devices and Printers] ([Control Panel] параметрін таңдаңыз, содан соң Windows 8 жүйесінде [Printer], [Control Panel] және [Printer] тармағын, ал Windows Vista және Windows XP жүйесінде [Printers and Faxes] тармағын таңдаңыз). Sony UP-991AD/971AD принтер белгішесін таңдаңыз, содан соң [Printing preferences] параметрін таңдау үшін (Windows 8 және Windows Vista жүйесінде бірдей; пәрмен тақтасындағы [Select printing preferences]; Windows XP жүйесінде [File] мәзіріндегі [Printing preferences]) тінтуірдің оң жағын басыңыз. Осы жердегі параметрлер UP-991AD/UP-971AD принтері үшін әдепкі параметрлер ретінде пайдаланылады. Дегенмен, кейбір құрылғының бағдарламалық құралының әдепкі параметрлерінде басымдылық болуы мүмкін.
- Құрылғыңыздың басып шығару параметрінің экранында принтердің параметрлерін жасау үшін пайдаланылатын пәрменді басыңыз. Осы әдіспен жасалған параметрлер бағдарламаны жапқанға дейін әсер етеді.

Бұл нұсқаулық UP-991AD/UP-971AD параметрлер экранында көрсетілетін қойындыларды сипаттайды.

[Main] қойындысы

Басып шығаруға қатысты (мысалы, қағаз өлшемі, басып шығару көшірмелерінің саны, т.б.) негізгі параметрлерді реттейді.

[Density Adjust] қойындысы

Басып шығару кескіндердің тығыздығын реттейді.

[Settings] қойындысы


Принтер параметрін немесе принтердің драйвер параметрін пайдалануды таңдайды.

[Message] қойындысы

Хабардың диалогтық терезелеріне қатысты дисплей параметрлерін орнатады.

[Main] қойындысының параметрлері

Бұл қойынды негізгі басып шығару параметрлерін жасау үшін пайдаланылады.

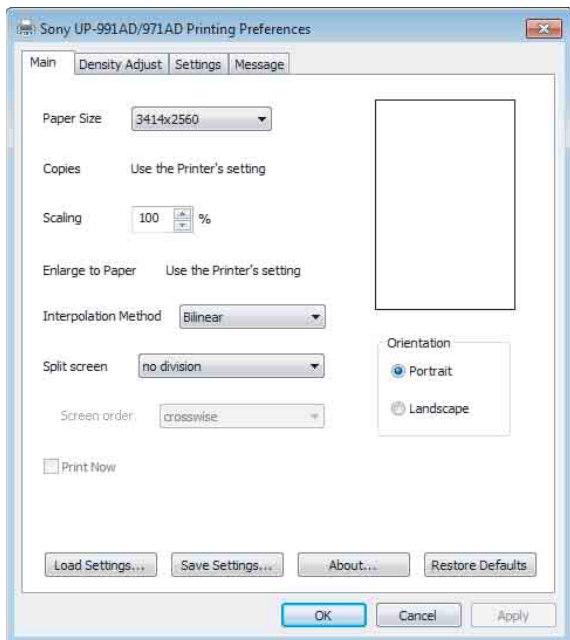

Paper Size

Қағаз өлшемін таңдаңыз.




Өлшем (нүктелер)	Өлшем (ұзындық)
1920 × 2560	150 × 200 мм
2560 × 2560	200 × 200 мм
3414 × 2560	267 × 200 мм
7680 × 2560	600 × 200 мм
3414 × 2560 (түзету)	267 × 200 мм

3414 × 2560 (түзету) өлшемін таңдаған кезде, қағаз өлшемі түзетіледі (басып шығарылатын аймақ 267 × 200 мм өлшеміне түзетілді). Егер басып шығарылатын кескін басып шығарылатын аймақтан кішірек болса, кескіннің жоғарғы, төменгі, сол және оң жағына жақтаулар қосылады. 3414 × 2560 (түзету) өлшемінен басқа өлшемді таңдаған кезде, қағаздың ұзындығы басып шығарылатын кескіннің өлшеміне байланысты әр түрлі болады. Егер басып шығарылатын кескін басып шығарылатын аймақтан кішірек болса, жақтаулар кескіннің тек сол және оң жағына қосылады. Қағаз жоғарғы және төменгі жақтаулардың ұзындығы бойынша қиылды.

Ескерту

Қолдануға байланысты қағазды қию мүмкін болмайды.

Басып шығару нәтижелерінің мысалы

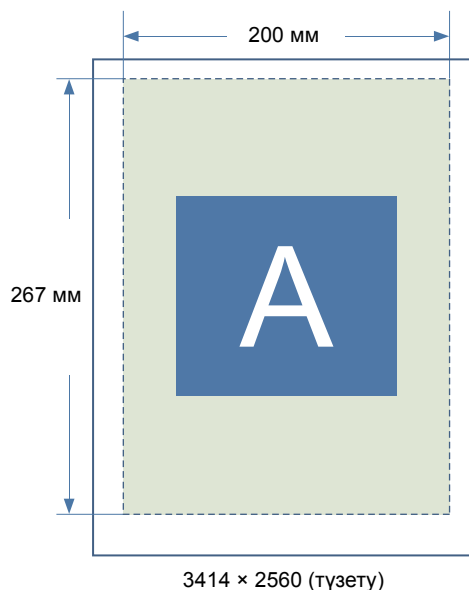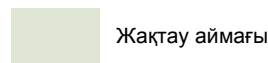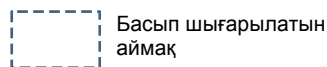

Copies

Басып шығару үшін көшірмелердің санын таңдаңыз (1 - 10).

Ескерту

[Settings] қойындысындағы [Copies] ұяшығына белгі қойылған кезде, принтердің параметрі пайдаланылады. Принтердің драйвер параметрін пайдалану үшін [Settings] қойындысындағы [Copies]

ұяшықтан белгіні алып, параметрді осы жерде жасаңыз.

Scaling

Арттыру немесе азайту жылдамдығын таңдаңыз (25% - 400%).

Enlarge to Paper

Басып шығаруды қағаз өлшеміне автоматты түрде ұлғайту үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Басып шығаруды қағаз өлшеміне сәйкес [Interpolation Method] параметрімен арттыру үшін пайдаланылатын интерполяция әдісін көрсетуге болады.

Ескерту

[Settings] қойындысындағы [Enlarge to Paper] ұяшығына белгі қойылған кезде, принтердің параметрі пайдаланылады. Принтердің драйвер параметрін пайдалану үшін [Settings] қойындысындағы [Enlarge to Paper] ұяшықтан белгіні алып, параметрді осы жерде жасаңыз.

Interpolation Method

Кескіндердің өлшемін өзгерту кезінде интерполяция әдісін көрсетіңіз.

Бөлінген экран басып шығаруға кескіндердің өлшемін өзгерту немесе қағаз өлшеміне сәйкес кескіндерді арттыру үшін кескіндердің өлшемін өзгерту кезінде осы параметрмен көрсетілген интерполяция әдісі қолданылады.

Қол жетімді параметрлер: [Bilinear] және [Nearest Neighbor].

Split screen

Қағаздың бір парағында басып шығару үшін кескіндердің санын көрсету үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Қол жетімді параметрлер: [no division], [2 division], [2 division with frame], [4 division] және [4 division with frame].

Бөлінген экран параметрлері мен ағымдағы басып шығару кескінінің орналасуын экранда тексеруге болады. Әрбір бөлінген экран кескіні үшін ▼ белгісі келесі кескін үшін орынды көрсеткенде, орналасып қойылған жеке кескіндердің аймақтары ашық жасыл түсте көрсетіледі. Сондай-ақ, көрсеткі бөлінген кескіндер орналасатын ретті көрсетеді.

Бөлінген экранды басып шығару барысында кескіндер таңдалған [Interpolation Method] параметрге сәйкес басып шығарылады.

Screen order


4 бөлікті бөлінген экран басып шығару барысында кескіндер орналасқан ретті анықтау үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

[Split screen] параметрі [4 division] немесе [4 division with frame] мәніне орнатылған кезде, осы параметр үшін [crosswise] немесе [lengthwise] опциясын таңдауға болады.


Келесі мысалдар өзгертулер [Main] қойындысындағы [Orientation] және [Split screen] мәніне және бөлінген экран кескіне орналасқан кескіндердің санына жасалған кезде, кескін параметрлердің оң жағында көрсетілу әдісін көрсетеді.

Пайдаланатын құрылғыға байланысты басып шығару нәтижелері UP-991AD/UP-971AD принтер параметрлері бірдей болса да әр түрлі болуы мүмкін. Нақты нәтижелерді тексеру үшін кескінді басып шығарыңыз.

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
Мыс. 1: Orientation: Landscape, Split screen: no division




Мыс. 2: Orientation: Landscape, Split screen: 2 division, positioned images: 0

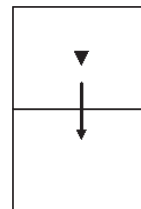


Мыс. 3: Orientation: Landscape, Split screen: 4 division, positioned images: 1

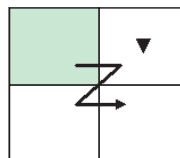


Мыс. 4: Orientation: Portrait, Split screen: 2 division, positioned images: 0

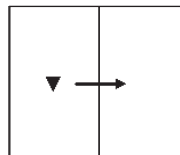

Мыс. 5: Orientation: Portrait, Split screen: 4 division with frame, positioned images: 0

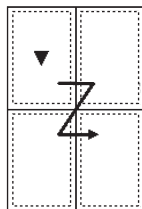

Мыс. 6: Orientation: Portrait, Split screen: 4 division with frame, positioned images: 2

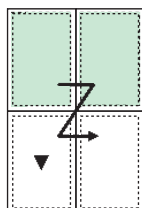

Print Now

Бір бетте бірнеше кескіндерді басып шығару үшін бөлінген экран функциясын пайдалану барысында ұяшыққа белгі қойған кезде, басып шығару басып шығару пәрменін таңдағаннан кейін дереу орындалады.

Егер ұяшыққа белгі қойылмаса, [Split screen] параметрімен көрсетілген әрбір бөлінген экран орны үшін басып шығару пәрменін таңдамағанша басып шығару әрекеті орындалмайды. [Split screen] параметрі [no division] мәніне орнатылған кезде, бұл ұяшық өшірілген және оның параметрін өзгерту мүмкін емес.

Orientation

Басып шығару бағдарына арналған [Portrait] немесе [Landscape] параметрді таңдаңыз.

Load Settings

Сақталған параметр конфигурацияларын файлдан жүктейді.

Save Settings

Барлық басып шығару параметрінің конфигурацияларын файлға сақтайды.

About


Осы принтер драйверінің нұсқау туралы ақпаратын көрсетеді.

Restore Defaults

[Main] қойындысындағы барлық параметрлерді олардың әдепкі күйіне қалпына келтіреді.

[Density Adjust] қойындысының параметрлері

Кескіннің тығыздығын реттейді. Реттеу тығыздық графигінде және параметр экранының жоғарғы оң жақтағы градияция тақтасында көрсетіледі. Дегенмен, [Gamma] және [Sharpness] параметрінің орнатылған мәнінің әсері көрсетілмейді. Тығыздылық графигінің тік осі жоғарғы шектеу ақ тығыздыққа қатысты және төменгі шектеу қара тығыздыққа қатысты шын мәнінде басып шығарылған кескіннің тығыздығын көрсетеді. Көлденең ось жоғарғы шектеу ақ деректерге қатысты және төменгі шектеу қара деректерге қатысты кескін деректерін көрсетеді. Градияция тақтасы тығыздық графигінің тік осінің мәнінің орнына нақты тығыздықты көрсетеді.

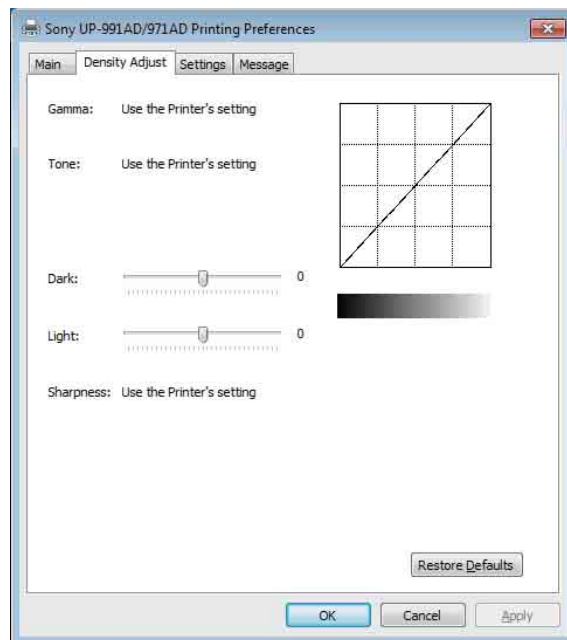

GAMMA

Жартылай реңк градияцияның қарқындылығын таңдайды.

Егер кескінде қара немесе ақ бөлігі көп болса, осы параметрді реттеу арқылы сол бөліктердегі анық мәліметтерді алуға болады.

Элемент	Түсіндіру
TONE1	Стандарт
TONE2	Ақ бөліктері көп (жұмсақ реңк) кескінді басып шығарғанда
TONE3	Қара бөліктері көп (қатты реңк) кескінді басып шығарғанда

Ескерту

[Settings] қойындысындағы [Gamma] ұяшығына белгі қойылған кезде, принтердің параметрі пайдаланылады.

Принтердің драйвер параметрін пайдалану үшін [Settings] қойындысындағы [Gamma] ұяшықтан белгіні алып, параметрді осы жерде жасаңыз.

Tone

Градицияның деңгейін таңдау үшін жүгірткіні апарыңыз. Таңдалған мән үлкенірек болса, градиция күңгірттеу болады. Градицияны 65 мәннің біреуіне реттеуге болады. Стандартты мән 0 болады. Реттелетін ауқымы -32 мен +32 аралығы.

Ескерту

[Settings] қойындысындағы [Tone] ұяшығына белгі қойылған кезде, принтердің параметрі пайдаланылады.

Принтердің драйвер параметрін пайдалану үшін [Settings] қойындысындағы [Tone] ұяшықтан белгіні алып, параметрді осы жерде жасаңыз.

Dark

Кескіннің күңгірт бөліктерін реттеу үшін жүгірткіні апарыңыз. Таңдалған мән үлкенірек болса, кескіннің күңгірт бөліктері күңгірттеу болады. Градицияны 129 мәннің біреуіне реттеуге болады. Стандартты мән 0 болады. Реттелетін ауқымы -64 мен +64 аралығы.

Light

Кескіннің жарық бөліктерін реттеу үшін жүгірткіні апарыңыз. Таңдалған мән үлкенірек болса, кескіннің жарық бөліктері ашықтау болады. Градицияны 129 мәннің біреуіне реттеуге болады. Стандартты мән 0 болады. Реттелетін ауқымы -64 мен +64 аралығы.

Sharpness

Кескіннің контурын реттеу үшін жүгірткіні апарыңыз. Таңдалған мән үлкенірек болса, кескіннің бұрыштары үшкір болады. Градицияны 15 мәннің біреуіне реттеуге болады. Стандартты мән 0 болады. Реттелетін ауқымы 0 мен 14 аралығы.

Ескерту

[Settings] қойындысындағы [Sharpness] ұяшығына белгі қойылған кезде, принтердің параметрі пайдаланылады.


Принтердің драйвер параметрін пайдалану үшін [Settings] қойындысындағы [Sharpness] ұяшықтан белгіні алып, параметрді осы жерде жасаңыз.

Restore Defaults

[Density Adjust] қойындысын бассаңыз, барлық параметрлерді олардың әдепкі күйіне қалпына келтіреді.

[Settings] қойындысының параметрлері

Принтер параметрін немесе әрбір элемент үшін принтердің драйвер параметрін пайдалануды таңдаңыз.

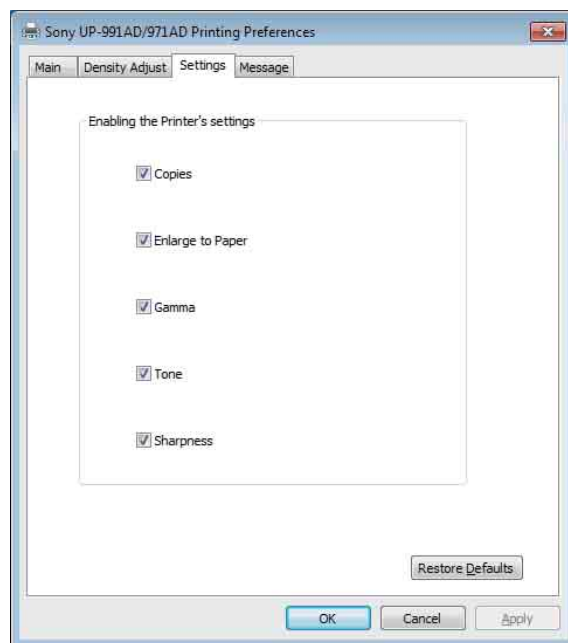

Copies

Принтердің параметрін пайдалану үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Бұл, сондай-ақ [Main] қойындысындағы [Copies] параметрін өшіреді. [Main] қойындысындағы [Copies] параметрін пайдалану үшін осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Enlarge to Paper

Принтердің параметрін пайдалану үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Бұл, сондай-ақ [Main] қойындысындағы [Enlarge to Paper] параметрін өшіреді. [Main] қойындысындағы [Enlarge to Paper] параметрін пайдалану үшін осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Gamma

Принтердің параметрін пайдалану үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Бұл, сондай-ақ [Density Adjust] қойындысындағы [GAMMA] параметрін өшіреді.

[Density Adjust] қойындысындағы [GAMMA] параметрін пайдалану үшін осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Tone

Принтердің параметрін пайдалану үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Бұл, сондай-ақ [Density Adjust] қойындысындағы [Tone] параметрін өшіреді. [Density Adjust] қойындысындағы [Tone] параметрін пайдалану үшін осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Sharpness

Принтердің параметрін пайдалану үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Бұл, сондай-ақ [Density Adjust] қойындысындағы [Sharpness] параметрін өшіреді. [Density Adjust] қойындысындағы [Sharpness] параметрін пайдалану үшін осы ұяшықтан белгіні алыңыз.

Restore Defaults


[Settings] қойындысындағы барлық параметрлерді олардың әдепкі күйіне қалпына келтіреді.

[Message] қойындысының параметрлері

Хабардың диалогтық терезелеріне қатысты дисплей параметрлерін орнатады.

Хабардың диалогтық терезелері, мысалы, UP-991AD/UP-971AD қатесі пайда болғанда көрсетіледі.

Хабардың диалогтық терезелері екі өлшемде көрсетіледі; стандарт және шағын. Хабардың стандартты диалогтық терезесі принтердің қате туралы күйі мен қатені өңдеуге арналған нұсқауларды көрсетеді. Хабардың шағын диалогтық терезесі принтердің қатені өңдеуге арналған қарапайым нұсқауларды (бір сөйлем) көрсетеді. Әрбір хабар туралы толық ақпарат алу үшін «Хабарлар тізімі» (бет 9) бөлімін қараңыз.

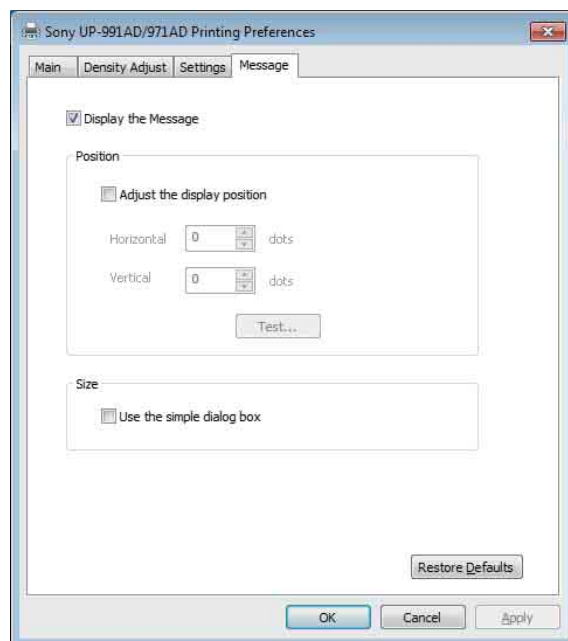

Display the Message

Хабардың диалогтық терезесін көрсету үшін ON/OFF күйін орнатыңыз.

Егер ұяшықта OFF мәні болса, [Message] қойындысында басқа параметрлерді орнатуға болмайды.

Adjust the Display Position

Хабардың диалогтық терезелерінің көрсету орнын реттеу үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз. Хабардың диалогтық терезесі [Horizontal] және [Vertical] параметрлерінде көрсетілген мәндер арқылы анықталған орында көрсетіледі.

Әдепкі параметр: [Adjust the Display Position] мәніне қойылмағанын тексеріңіз. (Хабардың стандартты диалогтық терезесі дисплейдің ортасында көрсетіледі, ал хабардың шағын диалогтық терезесі дисплейдің жоғарғы сол жақ бөлігінде көрсетіледі.)

Horizontal, Vertical

[Adjust the Display Position] ұяшығына белгі қойылған кезде, бұл параметрлер өшіріледі. Дисплей орнының координаталарын енгізіңіз (хабардың диалогтық терезесінің жоғарғы сол жақ бұрыштағы орын).

Хабардың диалогтық терезесі осы жерде көрсетілген мәндер арқылы анықталған орында көрсетіледі.

Test

Дислейде немесе экранда көрсетілетін хабардың диалогтық терезелерінің орналасуын тексеріңіз. [Horizontal] және [Vertical] параметрлерімен

анықталған орналасуда сынақ диалогтық терезесі көрсетіледі.

Use the Simple Dialog Box

Шағын өлшемді хабардың диалогтық терезелерін көрсету үшін осы ұяшыққа белгі қойыңыз.

Restore Defaults

[Message] қойындысындағы барлық параметрлерді олардың әдепкі күйіне қалпына келтіреді.

Хабарлар тізімі

Көрсетілетін хабарлар келесілер. Төмендегі хабарларды орындау арқылы кез келген ақауларды түзетіңіз. Ақауларды түзету туралы толық ақпаратты алу үшін осы нұсқаулықпен үйлесімді UP-991AD/UP-971AD құрылғысының пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Хабардың стандартты диалогтық терезесі	Хабардың шағын диалогтық терезесі
No thermal paper. Please set the thermal paper. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Set thermal paper.
Now, Feeding. Please wait. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Door is open. Please close the door. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Close door.
Now printing the video image. Please wait. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Now regulating the head temperature of the printer. Please wait. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Please wait.
Paper jam. Please remove the jammed paper. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Remove jammed paper.
Paper jam. Printing is aborted. Please remove the jammed paper and print again.	Remove jammed paper.
Incorrect paper type. Please set the correct paper type. To continue printing, click “Retry.” Windows will automatically retry after 5 seconds.	Incorrect paper type.
Mechanical error. Printing has been aborted. Please turn off the printer, then turn it back on and print again.	Restart printer.

Хабардың стандартты диалогтық терезесі	Хабардың шағын диалогтық терезесі
Printer is not ready. Make sure the printer is plugged in to a power source and the printer cable is correctly connected. To continue printing, click "Retry." Windows will automatically retry after 5 seconds.	Check printer.

Пайдалануға арналған сақтық шаралар

Бұл бөлімде пайдалануға арналған сақтық шаралар сипатталады.

Сондай-ақ, басқа да сақтық шаралар сипатталған «Readme» файлын оқыңыз.

- Егер принтер USB хабы арқылы қосылса, басып шығаруға кепілдік берілмейді.
- Бірге пайдаланатын USB құрылғыларына байланысты құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Басып шығаруды аяқтағаннан кейін 2 немесе 3 секунд ішінде құрылғыны өшірмеңіз немесе қуат кабелін ажыратпаңыз. Келесі басып шығару қалыпты орындалмауы мүмкін.
- Принтерде өзінің [test] әрекетін орындалған кезде, қабаттасқан таңбалар басылып шығуы мүмкін. Бұл қалыпты нәтиже және ақау емес.
- Принтер қосулы кезде оның жұмысын тоқтатуға болмайды.
- Көшірмелердің санын құрылғылар арқылы принтердің сыйымдылығынан артық санға орнатуға болады. Дегенмен, көшірмелердің санын 10 көшірмеден асатын санға орнатыңыз.
- Егер принтер компьютерге қосылып, іске қосулы болғанда, компьютер ұйқы режимінде немесе күту режимінде болса, принтердің жұмысына кепілдік берілмейді.
- Хабардың орналасуын реттеген кезде, компьютердің экран параметрінен Windows классикалық параметрін таңдаңыз. Егер таңдалмаса, хабардың орналасуы өзгеруі мүмкін.